

*Tecnologia computerizzata per la*  
**CONTRACCZIONE**

*made in Germany*



**PEARLY®**

**LADY-COMP®**

*Un metodo innovativo e semplice  
per evitare la gravidanza senza effetti collaterali*

[www.babycomp-medical.it](http://www.babycomp-medical.it)

In Farmacia



Distribuito in Italia da:  
**Baby Comp srl** - Via V. Veneto 79  
39042 BRESSANONE BZ  
P.I./Cod.Fisc.01348470210  
**Tel. 0472 831010**



Prodotto da:  
Valley Electronics GmbH  
Eschenlohe  
GERMANY

# Contracezione tecnologica

senza effetti collaterali



Quando vuoi separare l'atto sessuale dalla procreazione, non necessariamente devi scegliere tra salute e sicurezza. Come?

Usando un metodo non invasivo, con un'affidabilità contraccettiva del 99,3%

## Cosa sono BabyComp, LadyComp e Pearly\*?

Sono indicatori di fertilità computerizzati di facile utilizzo, adatti a qualsiasi donna fertile, anche con cicli irregolari, che non può o non vuole assumere farmaci anticoncezionali e quindi decide di usare un metodo contraccettivo tecnologico che non interferisca con i suoi ritmi biologici.

## Come funzionano BabyComp, LadyComp e Pearly ?

Sugli apparecchi è installato un software. I dati che vengono analizzati per stabilire lo stato di fertilità e l'ovulazione sono: il dato mestruale e la temperatura basale, rilevata in modo sublinguale con un apposito termistore.

La determinazione della durata della finestra fertile del ciclo mestruale viene fatta tenendo presente che una donna potrebbe essere fertile per 7 giorni: i 5 che precedono l'ovulazione, il giorno della stessa ovulazione e, talvolta, quello successivo, in caso di doppia ovulazione.

Attraverso l'analisi della curva termica viene individuata l'avvenuta ovulazione e quindi la fine della fase fertile del ciclo mestruale. Il calcolo che il programma esegue, per indicare invece i giorni pre-ovulatori sicuramente non fertili, si basa su sofisticati algoritmi e calcoli biomatematici dei cicli personali della donna, che vengono tenuti in memoria per circa 10 anni in Pearly e 20 in LadyComp e BabyComp.

Grazie alla memoria dati, il software esegue un calcolo dei valori medi delle temperature delle diverse fasi del ciclo, effettua delle comparazioni e quindi è in grado di **distinguere singoli dati di temperature non attendibili (ad es. per febbre elevata)**. L'indicazione di fertilità giornaliera, valida per 24 ore, è di: **rosso = fertile o verde = NON fertile**.

\*Sono dispositivi medici CE 0124 Classe 2 B. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

# Semplicità, convenienza, soddisfazione

Per un metodo nato, pensando alla donna



*Amo il mio corpo e cerco di vivere in modo sano. Nel rispetto di me stessa ho detto: Sì a BabyComp, un metodo per la contraccezione innocuo, moderno e semplice da usare.*

Con BabyComp, Ladycomp e Pearly, in 1 minuto al giorno, sai se sei fertile o no.

Quando ricevi l'apparecchio l'ora, la data e l'anno sono già impostati. Per poter fare la 1a misurazione, devi solo variare e attivare la sveglia integrata,

- per misurare basta appoggiare la punta del termosensore sotto la lingua. Dopo circa 1 minuto, con un segnale acustico, l'apparecchio ti informa che la misurazione è terminata.
- quando presenti, confermi la comparsa delle mestruazioni.
- il computer ti indica, in tempo reale, con il **rosso** se sei fertile oppure con il **verde** quando "non sei fertile" (affidabilità contraccettiva 99,3%)

## Convenienza e risparmio

BabyComp, LadyComp e Pearly rappresentano anche un modo per risparmiare tempo e denaro. Il loro utilizzo, da considerarsi fino alla menopausa, non richiede acquisti aggiuntivi di stick o altro.

## Fiducia in un metodo che soddisfa le aspettative

La sicurezza di metodo di BabyComp, LadyComp e Pearly risulta essere del 99,3%, quando il metodo è usato secondo le istruzioni e come unico metodo contraccettivo.

Gli apparecchi non offrono alcuna protezione dalle infezioni trasmesse per via sessuale o dall'HIV.

Sono dispositivi medici CE 0124, leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

# Esempio di Stampa Dati

## Contracezione con Pearly

Donna che utilizza Pearly già da 39 mesi.

Ha un ciclo leggermente irregolare che oscilla tra 23-28 giorni.

La fase post-ovulatoria è di 13-15 giorni.

Distribuzione dati analoghi


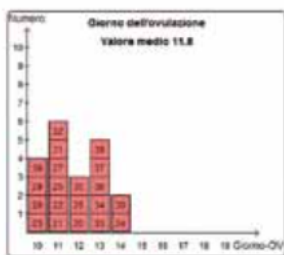


Tabella dei cicli

Ciclo numero - C	8	22	21	22	22	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Maturazione marcata del giorno	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lunghezza del ciclo (giorni)	25.7	27	25	25	24	26	25	24	25	24	24	26	24	25	27	27	25	27	27	25	27
Giorno dell'ovulazione	11.8	12	11	11	10	14	11	12	11	10	10	14	11	12	13	12	13	13	13	14	13
Temp. media fase ipertermica	36.56	36.57	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01
Temp. media fase ipertermica	36.35	36.43	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01
Diagnosi CLUPPO (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plasificazione mensile (ovetta2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Numero temp. in fase OV	0.29	0.41	0.42	0.47	0.40	0.43	0.42	0.39	0.36	0.33	0.37	0.29	0.41	0.37	0.39	0.39	0.44	0.42	0.43	0.41	0.28
Lunghezza fase post-OV (H2)	13.9	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13	14	14	14	14	14	14	13	14

(1) CLU (Cycle Luteal Insufficiency) insufficienza fase luteale / PO Cicli anovulatori

(2) "-" = il dato RES (Rapporto Sensibile) e OV (Ovulazione) standardizzati

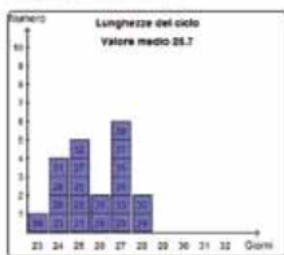

Esempio illustrato ridotto.

Le informazioni contenute nelle stampe dei dati non costituiscono motivo di autodiagnosi o di automedicazione, e non sostituiscono la consulenza medica e/o professionale. Rappresentano un complemento diagnostico di utilità per il ginecologo.

# Domande - Risposte

Sull'utilizzo di Pearly, LadyComp e BabyComp



## Chi può usare BabyComp, LadyComp e Pearly?

Ogni donna in età fertile, che voglia compiere una scelta di rispetto dei propri ritmi biologici e che non interferisca con la spontaneità dei rapporti.

## Posso iniziare con l'utilizzo subito dopo il contraccettivo ormonale?

Sì, dopo la comparsa dell'emorragia da interruzione, puoi iniziare con le misurazioni.

## Posso fidarmi dell'apparecchio sin dal primo giorno di utilizzo?

Sì, le indicazioni di BabyComp, LadyComp e Pearly, di "non fertilità" (verde) possono aiutarti sin da subito. Prima di iniziare con l'utilizzo degli apparecchi, se la donna non ha appena smesso la pillola, può abbreviare i tempi di apprendimento immettendo nell'apparecchio i dati delle mestruazioni precedenti.

## Quanti giorni rossi per ciclo indica l'apparecchio?

Il numero dei giorni rossi (fertili) dipende dalla regolarità e dalla stabilità ormonale del ciclo.

Una donna con cicli molto regolari avrà la maggior parte delle volte 7 giorni rossi; se accade che l'ovulazione ritarda di 2 giorni, l'apparecchio per quel mese indica 2 giorni rossi (potenzialmente fertili) in più.

Quando il ciclo è irregolare l'oscillazione dell'ovulazione è più ampia i margini di calcolo sono maggiori.

Nei cicli più brevi avremo il numero minimo di giorni rossi: 7.

Nei cicli in cui l'ovulazione ritarda, pur rimanendo inalterato il calcolo dell'inizio della finestra fertile del ciclo, l'apparecchio continuerà ad indicare rosso fino a che non è avvenuta.

Anche in caso di ciclo irregolare, i giorni riconosciuti come non fertili, indicati con il verde = non fertili, sono da considerarsi affidabili al 99,3%.

## Devo effettuare la misurazione sempre alla stessa ora?

No, l'apparecchio consente di poter misurare la temperatura all'orario di sveglia desiderato. Può infatti essere usato anche da donne che fanno un lavoro a turni.

L'apparecchio definisce un margine di tempo utile per la misurazione di almeno 6 ore, che può essere variato anche giornalmente dalla donna, sulla base delle sue esigenze.

Per Assistenza tecnica sui dispositivi

- Tel. 0472831010 -

assistenza@babycomp.it

# Pearly o Ladycomp?

Quale scegliere



## PEARLY®

*indicatore di fertilità computerizzato utilizzabile da qualsiasi donna in età fertile, anche con cicli irregolari, come contraccettivo senza effetti collaterali.*

*L'affidabilità contraccettiva dei giorni indicati come "non fertili" è del 99,3%.*

### Indicazioni di fertilità giornaliera valida per 24 ore

- = non fertile
- = fase di apprendimento, dati mancanti, squilibrio ormonale
- = potenzialmente fertile

### Prognosi di:

- fertilità per i 6 giorni successivi
- comparsa delle mestruazioni.

### Altre indicazioni sul display

- dati elaborati negli ultimi 99 giorni
- sicura gravidanza dopo 18 giorni dal concepimento.

### Dati tecnici

- Memoria dati: fissa 10 anni, temporanea 99 giorni
- Dimensioni cm 7 x 10 - peso 60 gr.
- Display digitale
- Funzionamento con batteria al litio incorporata da sostituire ogni 2 anni ca.
- Utilizzo senza costi aggiuntivi mensili.
- Stampa dati, per l'analisi della fertilità, a pagamento.

## PEARLY

**Prezzo: Euro 345,00 con incluse**

- le spese di spedizione
- una custodia per il viaggio
- il libretto d'istruzioni
- 2 anni di Garanzia



PEARLY è un dispositivo medico CE 0124 Classe 2 B. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

# Pearly o Ladycomp?

Quale scegliere



## LADY-COMP®

*oltre ad avere le stesse funzioni di Pearly per la contraccezione e le indicazioni di fertilità giornaliera*

● = non fertile

● = fase di apprendimento

● = potenzialmente fertile

*consente il controllo dell'ovulazione con l'indicazione di rosso lampeggiante.*

☀ = pre-ovulatoria: prognosi dell'ovulazione  
post-ovulatoria: giorno dell'effettiva ovulazione

### Prognosi di:

- fertilità per i 6 giorni successivi
- giorno dell'ovulazione
- comparsa delle mestruazioni.

### Altre indicazioni sul display

- dati elaborati negli ultimi 180 giorni
- di gravidanza dopo 15 (probabile) e 18 (sicura) giorni dall'avvenuto concepimento

### Statistiche del ciclo

- oscillazione in giorni dell'ovulazione
- aumento della temperatura in fase ovulatoria
- numero di cicli memorizzati
- lunghezza media dei cicli

### Dati tecnici

- Memoria dati: fissa 20 anni, temporanea 180 giorni
- Dimensioni Ø 14 cm - altezza 3 cm - peso 200 gr.
- Display luminoso
- Funzionamento con batteria ricaricabile con alimentatore
- Autonomia di carica per un mese
- Utilizzo senza costi aggiuntivi mensili.
- Stampa dati e analisi di fertilità Gratuita durante la Garanzia.

## LADYCOMP

**Prezzo: Euro 512,00 con incluse**

- le spese di spedizione
- il trasformatore per la ricarica
- una custodia per il viaggio
- il libretto d'istruzioni
- 3 anni di garanzia



LadyComp è un dispositivo medico CE 0124 Classe 2 B. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.